

Οδηγίες Χρήσης

Σάκος Στομίας

Προϊόν: Ενός τεμαχίου σάκος κολοστομίας/ειλεοστομίας/ουροστομίας

Σκοπούμενη χρήση: Το προϊόν προορίζεται για την συλλογή εντερικού περιεχομένου ή ούρων μίας στομίας.

Προσοχή: Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης των προϊόντων αυτών. Εάν είναι απαραίτητο, συμβουλευτείτε τους νοσηλευτές ή τους γιατρούς σας. Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε τη βάση με κυρτή φλάντζα υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών υγείας. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς ή άλλες απώλειες που προκαλούνται από τη χρήση των προϊόντων, με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Συνιστάται να αλλάζετε τον σάκο στομίας κάθε μέρα. Μην απορρίπτετε τη σακούλα απευθείας στην τουαλέτα.

Αποθήκευση: Τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και τρία (3) χρόνια από την κατασκευή τους, εφόσον φυλάσσονται σε δροσερό και ξηρό μέρος. Συνιστάται η αποφυγή επαφής με τα παιδιά.

Προειδοποιήσεις: Αυτό το προϊόν είναι προϊόν εφάπαξ χρήσης. Η επαναχρησιμοποίηση ή η υπερβολική χρήση μπορεί να έχει πιθανούς κινδύνους για τον χρήστη. Η επανεπεξεργασία, ο καθαρισμός και η αποστείρωση του προϊόντος μπορούν να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά του, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει άλλους τραυματισμούς στον χρήστη ή να προκαλέσει μόλυνση. Εάν έχετε αλλεργίες, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε και συμβουλευτείτε τους επαγγελματίες ιατρούς. Εάν υπάρχει δερματικό ελάττωμα ή βλάβη στο σημείο της προσκόλλησης, παρακαλούμε να το χρησιμοποιείτε με προσοχή. Τα παιδιά ή οι ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται μπορεί να χρειαστούν τη βοήθεια άλλων για να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα. Κάθε σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με το παρόν ιατροτεχνολογικό προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στον κατασκευαστή και στην αρμοδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

Οδηγίες χρήσης:



1. Καθαρισμός του δέρματος

Καθαρίστε το δέρμα γύρω από την στομία με καθαρό νερό ή φυσιολογικό ορό. Στεγνώστε το δέρμα στο σημείο εφαρμογής.



2. Κόψιμο

Βρείτε το σωστό μέγεθος στο πίσω μέρος της βάσης ή του σάκου και ξεκινήστε να κόβετε το υδροκολλοειδές από την τρύπα στη μέση. Αφήστε κενό 2-3 χιλιοστά μεταξύ της τρύπας και της στομίας για την αποφυγή διαρροών.



3.1 Σάκος με Velcro Διπλώστε την ουρά του σάκου προς τα έξω μέχρι οι επιφάνειες του Velcro να έρθουν σε επαφή. Πιέστε τις επιφάνειες Velcro ώστε να σφραγίσουν σφιχτά.



3.2 Σάκος Ουροστομίας Τοποθετήστε το πώμα στην εύκαμπτη αποστράγγιση για να την σφραγίσετε.



4. Απομάκρυνση του προστατευτικού της κόλλας Απομακρύνετε το προστατευτικό της κόλλας από το υδροκολλοειδές.

5. Εφαρμογή του σάκου. Τοποθετήστε την στομία στο κέντρο του υδροκολλοειδούς. Απλώστε το υδροκολλοειδές απαλά προς το σώμα, ώστε να έρθει σε επαφή με το δέρμα γύρω από την στομία. Πιέστε το υδροκολλοειδές από το κέντρο προς τα άκρα στεγανοποιώντας.

6. Άδειασμα και καθαρισμός του σάκου (Αφορά σάκους Ειλεοστομίας και Ουροστομίας)



6.1 Σάκος Ειλεοστομίας Αδειάστε τον Σάκο όταν γεμίσει από 1/3 έως 1/2. Ανοίξτε την ουρά του σάκου, ρίξτε το περιεχόμενο στη λεκάνη της τουαλέτας. Καθαρίστε την ουρά του σάκου με νερό βρύσης, στεγνώστε εξωτερικά τον σάκο, σφραγίστε την ουρά του σάκου όπως στο βήμα 3. Συνεχίστε την χρήση.

6.2 Σάκος Ουροστομίας Αδειάστε τον σάκο όταν γεμίσει από 1/3 έως 1/2, τραβώντας το πώμα από την εύκαμπτη αποστράγγιση. Ρίξτε το περιεχόμενο στην λεκάνη της τουαλέτας. Καθαρίστε το πώμα με νερό βρύσης και τοποθετήστε το πώμα στην εύκαμπτη αποστράγγιση για να την σφραγίσετε, όπως στο βήμα 3.4.

7. Αφαίρεση του σάκου Πιέστε το δέρμα κάτω από την φλάντζα, ξεκολλήστε ελαφρά τη φλάντζα με το άλλο χέρι. Αποφύγετε να τεντώσετε το δέρμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καθαρό νερό ή καθαριστικό για να αποδυναμώσετε την περιοχή της κόλλας και να βοηθήσει στην αποκόλληση της φλάντζας.

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ		ΑΠΟΦΥΓΤΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ
	ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ		ΜΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ		ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ		ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ
	ΣΗΜΑΝΣΗ CE		ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ		ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΗ
	ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ LATEX / ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ		ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ		ΦΑΣΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 10 ΕΩΣ 30C
	ΣΗΜΑΝΣΗ CE		

Οδηγίες Χρήσης

Σάκος Στομίας

Προϊόν: Σύστημα δύο τεμαχίων για Ειλεοστομία/ Κολοστομία/Ουροστομία

Σκοπούμενη χρήση: Το προϊόν προορίζεται για την συλλογή εντερικού περιεχομένου ή ούρων μίας στομίας .

Προσοχή: Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης των προϊόντων αυτών. Εάν είναι απαραίτητο, συμβουλευτείτε τους νοσηλευτές ή τους γιατρούς σας. Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε τη βάση με κυρτή φλάντζα υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών υγείας, Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς ή άλλες απώλειες που προκαλούνται από τη χρήση των προϊόντων με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Συνιστάται να αλλάζετε τον σάκο στομίας κάθε μέρα. Μην απορρίπτετε τη σακούλα απευθείας στην τουαλέτα.

Αποθήκευση: Τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και τρία (3) χρόνια από την κατασκευή τους, εφόσον φυλάσσονται σε δροσερό και ξηρό μέρος. Συνιστάται η αποφυγή επαφής με τα παιδιά.

Προειδοποιήσεις: Αυτό το προϊόν είναι προϊόν εφάπαξ χρήσης. Η επαναχρησιμοποίηση ή η υπερβολική χρήση μπορεί να έχει πιθανούς κινδύνους για τον χρήστη. Η επανεπεξεργασία, ο καθαρισμός και η αποστείρωση του προϊόντος μπορούν να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά του, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει άλλους τραυματισμούς στον χρήστη ή να προκαλέσει μόλυνση. Εάν έχετε αλλεργίες, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε και συμβουλευτείτε τους επαγγελματίες ιατρούς. Εάν υπάρχει δερματικό ελάττωμα ή βλάβη στο σημείο της προσκόλλησης, παρακαλούμε να το χρησιμοποιείτε με προσοχή. Τα παιδιά ή οι ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται μπορεί να χρειαστούν τη βοήθεια άλλων για να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα. Κάθε σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με το παρόν ιατροτεχνολογικό προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στον κατασκευαστή και στην αρμοδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

Οδηγίες χρήσης:

1. Καθαρισμός του δέρματος. Καθαρίστε το δέρμα γύρω από την στομία με καθαρό νερό ή φυσιολογικό ορό. Στεγνώστε το δέρμα στο σημείο εφαρμογής.



2. Κόψιμο της βάσης στομίας. Βρείτε τη σωστή διάσταση της οπής στην βάση. Ξεκινήστε να κόβετε από την οπή στη μέση. Αφήστε κενό από 1/8 έως 1/16 ανάμεσα στην οπή και την στομία για να αποφύγετε διαρροές.



3. Ξεκολλήστε το προστατευτικό χαρτί. Ξεκολλήστε το προστατευτικό χαρτί της βάσης.



4. Εφαρμογή της βάσης. Τοποθετήστε την στομία στο κέντρο της οπής της βάσης πιέζοντας απαλά προς το δέρμα, κολλήστε τη βάση στο σώμα πιέζοντας απαλά από το κέντρο προς την περιφέρεια, ώστε να εφαρμόσει σωστά στο δέρμα.

5. Σφραγίστε τον Σάκο. (Αφορά Ειλεοστομία - Ουροστομία).

5.1 Σάκος με Velcro. Διπλώστε την ουρά του σάκου προς τα έξω μέχρι οι επιφάνειες του Velcro να έρθουν σε επαφή. Πιέστε τις επιφάνειες Velcro ώστε να σφραγίσουν.

5.2 Σάκος Ουροστομίας. Τοποθετήστε το πώμα στην εύκαμπτη αποστράγγιση για να την σφραγίσετε.

6. Εφαρμογή του σάκου στη βάση. Τοποθετήστε τον σάκο στη βάση πιέζοντας τον σάκο στον δακτύλιο ζεύξης, εφαρμόζοντας πίεση με το δάκτυλό σας μέχρι να ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος.

7. Αφαίρεση του σάκου. Πιέστε τη βάση και τραβήξτε ελαφρά με το άλλο χέρι το σάκο.

8. Αδειάστε και καθαρίστε τον σάκο (Αφορά σάκους Ειλεοστομίας και Ουροστομίας.)

8.1 Σάκος Ειλεοστομίας. Αδειάστε τον Σάκο όταν γεμίσει από 1/3 έως 1/2. Ανοίξτε την ουρά του σάκου και ρίξτε το περιεχόμενο στην λεκάνη της τουαλέτας. Καθαρίστε την ουρά του σάκου με νερό βρύσης, στεγνώστε εξωτερικά τον σάκο, σφραγίστε την ουρά του σάκου όπως στο βήμα 3. Συνεχίστε την χρήση.

8.2 Σάκος Ουροστομίας. Αδειάστε τον σάκο όταν γεμίσει από 1/3 έως 1/2 τραβώντας το πώμα από την εύκαμπτη αποστράγγιση ρίξτε το περιεχόμενο στην λεκάνη της τουαλέτας Καθαρίστε το πώμα με νερό βρύσης, και τοποθετήστε το πώμα στην εύκαμπτη αποστράγγιση για να την σφραγίσετε. όπως στο βήμα 5.4

9. Αντικαταστήστε τη βάση στομίας. Πιέστε το δέρμα κάτω από τη βάση, ξεκολλήστε τη βάση απαλά με το άλλο χέρι. Αποφύγετε να τεντώσετε το δέρμα. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε καθαρό νερό ή καθαριστικό για να αδυνατίσετε την κόλλα στην περιοχή και να βοηθήσετε την αποκόλληση.